



## 安全管理委員会からの耳より情報 VOL. 4



医療・介護ベッドのサイドレール(ベッド柵)の安全点検は行われていますか？

サイドレール(ベッド柵)やベッド用グリップ、ヘッドボードの隙間に、頭や首を挟み込む等の死亡・重症事故が、2007年5月14日～2016年9月30日の間に73件報告されています。

事故を未然に防ぐためには、適切な使用と日頃からの点検が大切です。


今回は、医療・介護ベッドを安全に使用するための安全点検チェック項目についてご紹介します。

- ① ヘッドボードとサイドレール等のすき間
- ② サイドレールとサイドレール等のすき間
- ③ サイドレール内の隙間
- ④ ベッド用グリップの固定レバー

隙間の目安は直径6cmの物が入り込まない、もしくは31.8cm以上

直径12cmの物が通らない

利用者の状態を確認しながら、ベッドの操作を行っていますか

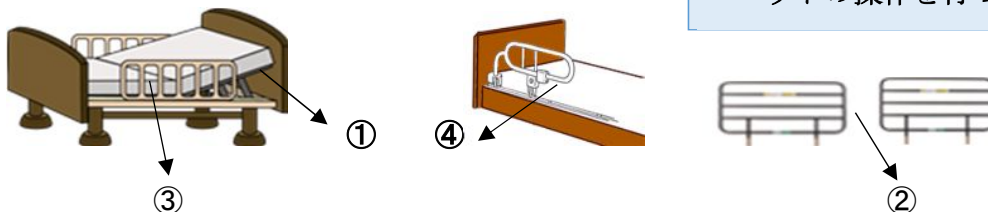

\* 医療・介護ベッド安全普及協議会作成「医療・介護ベッド安全点検表」より抜粋。

### 〔出典・資料〕

- ・ 医療・介護ベッド安全普及協議会

【ホームページ】 <http://www.bed-anzen.org>

【お問い合わせ先】 03-3648-5510

- ・ 医療・介護ベッド用サイドレール等のすき間に頭や首、手足などを挟む事故等の未然防止のための安全点検について。

(平成24年6月6日付厚生労働省医政局総務課長等

通知 医政総発0606第5号、障企自発0606第1号、障害発0606第1号、

老高発060第1号、老振発0606第1号、老老発0606第1号、24製安第13号)

平成29年6月  
安全管理委員会